

Solunäytteen näytteenotto-ohjeet

Näytteenottajan tulisi olla eläinlääkäri. Eläinlääkäriin pitäisi myös tunnistaa eläin ja vahvistaa eläimen tunnistus allekirjoituksellaan.

1. Älä ruoki eläintä 2 tuntia ennen näytteenottoa, jottei näytteeseen tulisi muusta lähteestä peräisin olevaa DNA:ta.
2. Hankaa posken limakalvoa voimakkaasti n. 15 sekunnin ajan, jotta solunäytteen ottoon käytettävään vanupuikkoon tarttuu tarpeeksi soluja.
3. Ota aina kaksi näytettä. Geenitestiä ei voida tehdä, jos näytteenottopuikossa ei ole tarpeeksi geneettistä materiaalia.
4. Kuivata näytteenottopuikkoja vähintään tunnin ajan käytön jälkeen. Liika kosteus voi pilata näytteen kuljetuksen aikana.
5. Laita näytteenottopuikko kuljetusputkeen, merkitse eläimen tiedot kuljetusputkeen ja lähetä näytteet samana päivänä.

Jos solunäytteiden näytteenotosta jäi jotain kysyttävää, ottakaa yhteyttä.